

RECOVERY+PLUS

GO TO THE NEXT LEVEL



PRESSOTERAPIA

RP 5.0

MANUALE D'USO

MISURE DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni per garantire la vostra sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto.

Avvertenze

- 1 · Se si verifica un dolore intenso, un sintomo insolito o si desidera interrompere l'uso del prodotto in caso di emergenza:
 - Premere il pulsante di accensione per fermare il dispositivo o scollegarlo.
 - Rimuovere gli stivali e consultare un medico.
- 2 · Consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto o scollegare i tubi in caso di:
 - Infiammazione, infezione o dolore di origine sconosciuta nella zona di applicazione o nelle vicinanze.
 - Fratture ossee o lussazioni nella zona di applicazione o nelle vicinanze.
 - Trattamenti medici in corso o controindicazioni che richiedano il controllo con dispositivi medici.
 - Uso di pacemaker o altri dispositivi medici sensibili alle interferenze elettriche.
 - Tumori maligni.
 - Patologie cardiache.
 - Grave neuropatia periferica o disturbi sensoriali dovuti al diabete.
 - Inidoneità all'uso del prodotto in caso di traumi fisici.
- 3 · Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non in grado di utilizzarlo in modo autonomo.

- 4 · Utilizzare solo l'adattatore di corrente originale.
- 5 · Non graffiare, danneggiare, manipolare, piegare eccessivamente, tirare o piegare il cavo di alimentazione o l'adattatore. In caso contrario, si potrebbero causare incendi o scosse elettriche.
- 6 · Non utilizzare il prodotto se l'adattatore non funziona o la spina è allentata.
- 7 · Non inserire o scollegare l'adattatore con le mani bagnate.
- 8 · Non collocare il telecomando su coperte o utilizzare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura.
- 9 · È vietato modificare, smontare o riparare il prodotto senza autorizzazione.



Precauzioni

- 1 · Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il prodotto. L'uso di un caricatore diverso può compromettere il funzionamento del sistema.
- 2 · Non utilizzare in bagno o in ambienti umidi.
- 3 · Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- 4 · Scollegare l'adattatore di corrente quando non si utilizza il prodotto.
- 5 · Non camminare mentre si sta utilizzando questo dispositivo.
- 6 · Non lasciare il sistema, l'alimentazione o altri accessori in luoghi dove possano essere danneggiati da bambini, animali domestici, insetti o liquidi.
- 7 · I prodotti forniti sono progettati per essere utilizzati da una sola persona alla volta.

DOMANDE FREQUENTI


D1: Come funziona il massaggio di questo prodotto?

R1: Si tratta di un dispositivo a compressione d'aria con 5 camere (ripartite tra piede, parte inferiore e superiore del polpaccio e coscia) che si gonfiano e si sgonfiano automaticamente secondo una frequenza sofisticata in grado di simulare un massaggio manuale. In questo modo si massimizza il flusso sanguigno in tutto il corpo, aiutando a ridurre il dolore muscolare nelle aree trattate e migliorare la circolazione.

D2: Quante modalità di massaggio offre? Qual è la differenza?

R2: Il prodotto offre sei modalità di massaggio:

Modalità A: RELAX

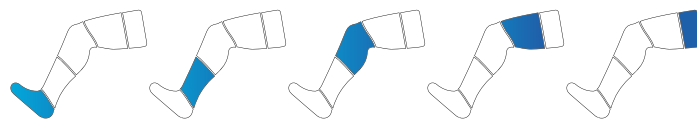

Modalità B: SEQUENZIALE




Modalità C: INTENSO




Modalità D: IMPULSO (P = Pulsazione)



Modalità E: DOPPIO SEQUENZIALE

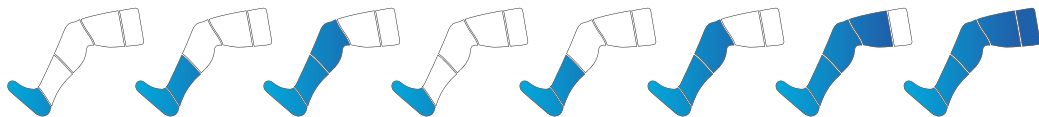

Modalità F: DOPPIO INTENSO

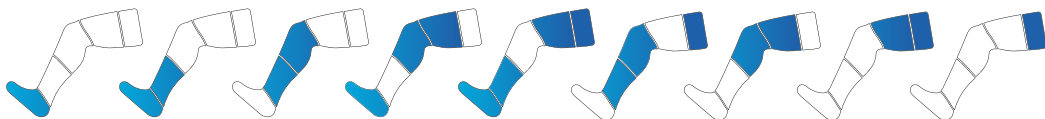

D3: Cosa devo fare se la pressione del massaggio è troppo bassa o troppo alta?

R3: Sono disponibili 7 livelli di intensità, da 50 mmHg a 230 mmHg. Selezionare il livello che meglio si adatta alle proprie esigenze. Se anche al livello più basso risulta troppo forte, interrompere l'uso e consultare il medico prima di riprendere.

D4: Quanto tempo è consigliato usare il dispositivo?

R4: Si consiglia di usarlo da 1 a 3 volte a settimana, per sessioni da 30 a 45 minuti. Gli sportivi possono usarlo quotidianamente e prolungare la durata fino a 60 minuti.

D5: Posso usarlo su una sola gamba?

R5: È possibile usarlo su una sola gamba collegando un solo stivale e coprendo l'altra uscita con il tappo fornito con l'adattatore 1 in 2. Tuttavia, per ottenere risultati migliori si consiglia l'uso su entrambe le gambe contemporaneamente.

D6: Perché l'unità di controllo fa rumore?

R6: Il rumore proviene dalla pompa dell'aria in funzione, che fornisce costantemente aria alle camere. È assolutamente normale.

D7: E se ho le gambe più grosse?

R7: Il prodotto è progettato per adattarsi alla maggior parte delle persone.

Se gli stivali risultano troppo stretti, è possibile acquistare estensioni nel nostro negozio o contattare il servizio post-vendita (info@recovery-plus.es) per ricevere il link di acquisto.

D8: Quando è meglio usarlo?

R8: Il dispositivo stimola la circolazione sanguigna per alleviare dolore muscolare e affaticamento. Può essere utilizzato in qualsiasi momento: Prima dell'esercizio per riscaldare i muscoli, dopo l'esercizio per favorire il recupero o dopo una giornata faticosa per rilassarsi.

Nome del prodotto	Sistema di recupero con compressione ad aria
Modello	RP 5.0
Adattatore	AC 100-240V 50/60Hz, DC15V/3A
Potenza nominale	45W
Modalità di compressione	6 modalità – Relax, Sequenziale, Intenso, Impulso, Doppio
Livelli di intensità Gamma di pressione:	7 livelli – 50 / 80 / 110 / 140 / 170 / 200 / 230 mmHg
Timer	da 15 a 45 minuti (intervalli di 15 min)
Peso del prodotto	5,7kg
Dimensioni	450X180X340mm
Tipo di stivale:	5 camere
Condizioni di utilizzo	Temperatura: da +5°C a 40°C Umidità: 5%–85% senza condensa Pressione atmosferica: 75Pa – 106Pa
Condizioni di stoccaggio	Temperatura: da -20°C a 40°C Umidità: 30%–85% senza condensa Evitare il contatto diretto con la luce solare Conservare in luogo asciutto

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
1· Il prodotto non funziona o lo schermo non si accende	1. Non è acceso. 2. L'adattatore non è collegato correttamente. 3. La presa a muro è difettosa.	1. Premere il pulsante di accensione. 2. Verificare che l'adattatore sia collegato correttamente alla centralina e alla presa. 3. Controllare un'altra presa a muro.
2· Lo schermo è acceso ma gli stivali non si gonfiano	1. Solo uno stivale è collegato al tubo dell'aria. 2. I tubi dell'aria non sono inseriti correttamente. 3. Gli stivali sono danneggiati.	1. Il sistema funziona solo se entrambi gli stivali sono collegati. 2. Verificare che i tubi siano inseriti completamente nella centralina e nella scatola di distribuzione (attenzione al segno "UP"). 3. Verificare eventuali perdite d'aria negli stivali. In caso affermativo, contattare info@recovery-plus.es

3. Il dispositivo si interrompe durante l'uso o non pompa aria	1. I tubi dell'aria non sono collegati correttamente. 2. L'adattatore è scollegato. 3. Il tempo della sessione è terminato.	1. Verificare i collegamenti dei tubi come sopra. 2. Controllare il collegamento dell'adattatore. 3. Il dispositivo si spegne automaticamente al termine della sessione. Premere il pulsante di accensione per avviare una nuova sessione.
---	--	---

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Unità di controllo



Indumento: stivali | pantaloni



Condotto dell'aria

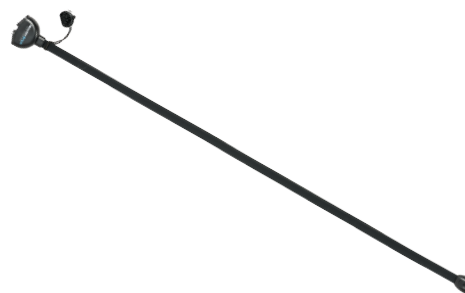

Caricabatterie



PULIZIA

- 1· In caso di sporco, pulire l'unità di controllo, gli stivali e i condotti con un panno pulito e umido.
- 2· Asciugare completamente con un panno asciutto.
- 3· Non utilizzare benzina, alcol, diluenti o altri liquidi aggressivi, poiché possono danneggiare i componenti o causare malfunzionamenti.
- 4· Non permettere l'ingresso di oggetti estranei nei condotti.
- 5· Non lavare a secco.

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE

- 1· Non tentare di smontare il prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di problemi, contattare il servizio clienti: info@recovery-plus.es
- 2· Tenere fuori dalla portata di bambini o persone che non possono usarlo autonomamente.
- 3· Non collocare il dispositivo in luoghi con alte temperature o umidità.
- 4· Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

- 5· Evitare che aghi o oggetti appuntiti danneggino gli stivali o i condotti.
 - 6· Non appoggiare oggetti pesanti sul dispositivo.
 - 7· Mantenere puliti i connettori della centralina, i tubi e il caricatore.
 - 8· Non permettere l'accumulo di polvere o lanugine.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto prima dell'uso.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Smaltire secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Unità di controllo
- 1x Condotto dell'aria
- 1x Adattatore AC 100-240V 50/60Hz, DC15V/3A
- 1x Scheda informativa con accesso al manuale d'istruzioni
- 2x Borse di stoccaggio per dispositivo e stivali
- 1x Borsa per il trasporto



GRAZIE

Grazie per aver scelto Recovery Plus e benvenuto nella famiglia R+.

Per maggiori informazioni visita: www.recovery-plus.es/support
Per qualsiasi domanda, il nostro servizio clienti è disponibile 24/7:

INFO@RECOVERY-PLUS.ES

+34 649 932 249

GO TO THE
NEXT
LEVEL

WWW.RECOVERY-PLUS.ES